

## دستورالعمل استفاده از فور

### استفاده از حرارت خشک (فور)

از درجه حرارت ۱۷۰ به مدت ۶۰ دقیقه استفاده می شود از این روش فقط برای وسایل فلزی و شیشه ای استفاده شود

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| ۱۶۰ درجه سانتی گراد | ۱۲۰ دقیقه   |
| ۱۵۰ درجه سانتی گراد | ۱۵۰ دقیقه   |
| ۱۴۰ درجه سانتی گراد | ۱۸۰ دقیقه   |
| ۱۲۱ درجه سانتی گراد | تمام طول شب |

❖ وقتی درجه حرارت فور به دمای مطلوب رسید احتساب زمان شروع می شود و در مدت استریلیزاسیون درب فور را حتی یک لحظه نباید باز کرد.

❖ دستگاه را خیلی زیاد پر نکنید (حداقل ۷/۵ اینچ معادل ۱۹ سانتیمتر یا سه اینچ معادل ۷/۵ سانتیمتر بین پکها و دیواره های دستگاه فاصله باشد) پر شدن بیش از حد دستگاه بر جریان گرما تأثیر گذاشته و زمان موثر برای استریل شدن را افزایش می دهد.